

deramed®

Foglio di Gel di Silicon Medical Grade per la prevenzione e il trattamento delle cicatrici ipertrofiche.



deramed® Gel di Silicone Medical Grade è un gel soffice di silicone Medical Grade al 100%, autoadesivo, studiato per la prevenzione e il trattamento delle cicatrici ipertrofiche.

Può essere usato per il trattamento delle cicatrici e la prevenzione dei cheloidi e le cicatrici ipertrofiche, su cicatrici più o meno recenti, Favorisce la guarigione del tessuto cicatriziale.



La striscia di silicone **deramed®** copre la cicatrice e limita il relativo movimento della pelle. L'azione occlusiva del silicone garantisce l'ambiente umido, mantenendo la pelle idratata e favorendo la guarigione dei tessuti.

deramed® è fornito in varie misure che, se necessario, possono essere ulteriormente tagliate e adattate alla cicatrice. Il prodotto è autoadesivo e una volta applicato rimane stabilmente in situ.

Può essere anche coperto con un cerotto o un bendaggio coesivo.

deramed® è un Dispositivo Medico. Monouso. Non Sterile. Non sterilizzabile. E' solo per uso esterno; non va utilizzato su ferite aperte o essudanti,

Non utilizzare prima di 3 giorni dalla rimozione dei punti di sutura o, in caso di ustioni, solo dopo la guarigione della ferita. Poiché le strisce di silicone non permettono una normale traspirazione della pelle, potrebbero formarsi degli eritemi sull'area di applicazione. In questo caso, ridurre il trattamento a 12 ore al giorno o meno. Se gli eritemi dovesse perdurare o si manifesta un dolore localizzato, interrompere il trattamento e consultare il medico.

Si consiglia di iniziare il trattamento con una applicazione di 2 ore il primo giorno, per poi aumentare progressivamente di 2 ore al giorno sino a 12 ore. Il prodotto può essere lasciato in situ anche sino a 24 ore.

Si raccomanda di lavare la striscia di silicone con sapone neutro ogni volta dopo l'uso, Essa non perde alcuna caratteristica e mantiene l'auto-adesività anche dopo ripetuti lavaggi (l'adesivo infatti è insito dentro il gel di silicone e non è applicato solo sulla superficie esterna).

Se opportunamente usata e lavata, la striscia di silicone **deramed®** può essere utilizzata sino a 30gg,

deramed® è disponibile nei seguenti codici e misure:

Codice	Descrizione	Pezzi
F-02555-01C	Deramed Gel di Silicone 7,5cm x 5cm	2
F-02555-02C	Deramed Gel di Silicone 10cm x 10cm	1
F-02555-08C	Deramed Gel di Silicone 20cm x 30cm	1
F-02555-03C	Deramed Gel di Silicone 30cm x 40cm	1
F-02555-04C	Deramed Gel di Silicone 40cm x 50cm	1

Deramed® è un prodotto della **Fresco** FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A. (Spain)

Distributore per l'Italia: Jas Medical Srl, via G. Garibaldi 16, Lissone (MB)

Tel:039 2621072/329 0708969; Fax: 039 3306696 Email: info@jasmedical.it website:www.jasmedical.it